

REV 1 1115 P/N 911-775650

LIFETIME LIMITED WARRANTY

Your MedPro® Mgrip™ Contoured Bedside Rail is warranted to be free from defects in material and workmanship under normal use. The warranty does not extend to non-durable components which are subject to normal wear and replacement.

GARANTIE LIMITÉE À VIE

Votre côté de lit profilé MedPro® Mgrip^{MC} est garanti contre tout défaut de matériel ou de fabrication sous une utilisation normale. Cette garantie n'inclut pas les pièces non durables, qui sont sujettes à l'usure normale et au remplacement.

AMG Medical Inc.
Montréal, QC H4T 1V5 • 1-800-363-2381
West Chazy, NY 12992 • 1-888-412-4992
www.amgmedical.com

MedPro®

The Professional Choice
Le choix des professionnels



M grip™

Contoured Bedside Rail Côté de lit profilé



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS PRIOR TO USING VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT


- This bedside rail is an assistive balance device. It is designed to assist people who are mobile, but require some assistance repositioning in bed, and to safely transfer out of bed. It is NOT intended for people with very poor mobility, or who are permanently bedridden. It is NOT designed to prevent people from falling out of bed.
- Although this product features adjustable crossbars to help prevent entrapment between the handle and the mattress, entrapment may still occur. Please ensure the handle is tight against the mattress, with no gap, and check it daily. The horizontal crossbars must be used at all times.
- You may use one rail in each side of the bed for additional support; however note that if the bed base is wider than the mattress, two will NOT fit. You will only be able to install a bedside rail on one side, and by lining up the mattress to be flush with the base.
- Suitable for all home style beds with box springs. Do not use on any type of hospital bed that can move or be adjusted.
- This device is NOT designed to support the full weight of a person. Beds may tilt over if full body weight is applied. This device is intended for users weighing up to **300 lb (136 kg)**.
- Ce côté de lit est conçu pour être utilisé par les personnes mobiles qui requièrent un peu d'aide pour ajuster leur position ou sortir du lit, en fournissant un point d'appui. Il n'est PAS conçu pour les personnes dont les contraintes de mouvement sont sévères ou qui sont alitées en permanence, NI pour empêcher son utilisateur de tomber du lit.
- Bien que les barres transversales ajustables aident à prévenir le piégeage entre le côté de lit et le matelas, elles ne peuvent pas éliminer complètement ce danger. Vérifiez quotidiennement que le côté de lit tient bien serré contre le matelas, sans espace vide. Les barres transversales doivent être utilisées en tout temps.
- Pour du soutien additionnel, il est possible d'utiliser deux Mgrip™, un de chaque côté du lit, à condition que la base du lit ne soit pas plus large que le matelas. Autrement, il vous sera seulement possible d'installer un Mgrip™ d'un côté après avoir aligné le rebord du matelas avec celui de la base de lit.
- Convient à tous les lits de type résidentiel avec sommier. Ne pas installer le Mgrip™ sur un lit de type hôpital pouvant être bougé ou ajusté.
- Ce produit n'est PAS conçu pour soutenir le poids complet d'une personne – cela pourrait faire basculer le lit. Poids maximal de l'utilisateur : **300 lb (136 kg)**.

BEFORE ASSEMBLING, DETERMINE YOUR HEIGHT SETTING!


The **MGrip** can be used with either two or three crossbars. For thicker/higher mattresses we recommend that you use three. If you choose to use two, discard part H (H bar).

TOUT D'ABORD, DÉTERMINEZ LA HAUTEUR QUI VOUS CONVIENT!


Le côté de lit **MGrip** peut être assemblé avec deux ou trois barres transversales. Nous recommandons d'en utiliser trois si votre matelas est surdimensionné. Autrement, vous n'aurez pas besoin de la barre en H.

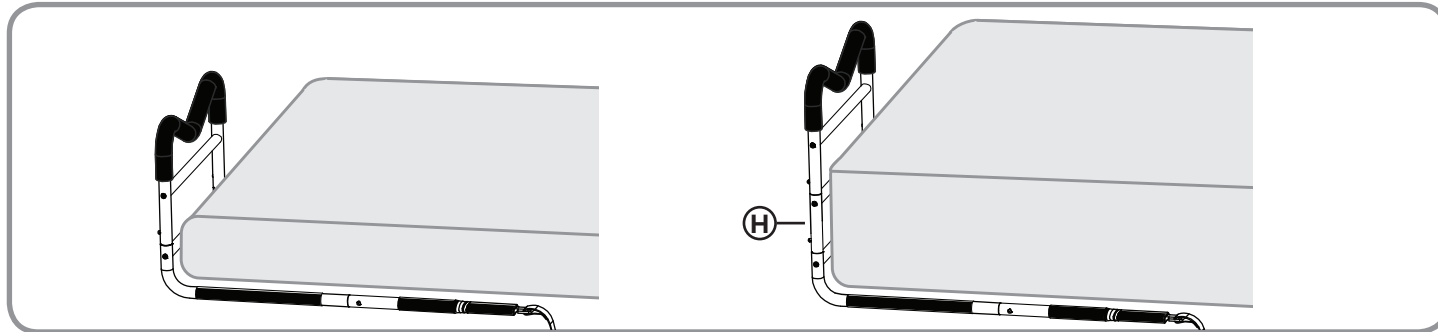


- 1** Insert the L-shaped tubes into the mattress wraps. Ensure push-buttons click into place.
Insérez les tubes en L dans les tubes munis de sangles, jusqu'à ce qu'un "clic" indique qu'ils sont verrouillés en place.

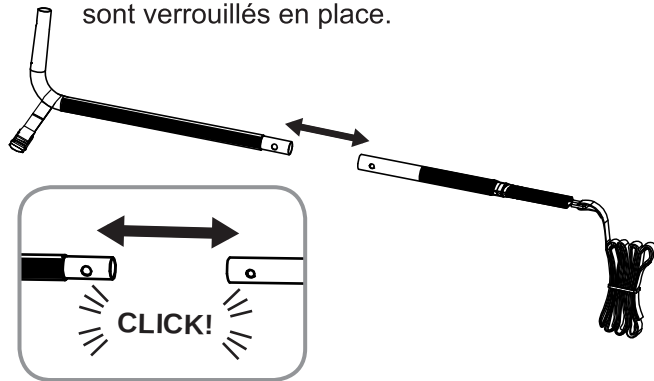

- 2** Screw the single crossbar into place, but leave the screws loose.
Vissez la barre transversale libre en place, sans toutefois serrer les vis jusqu'au bout.

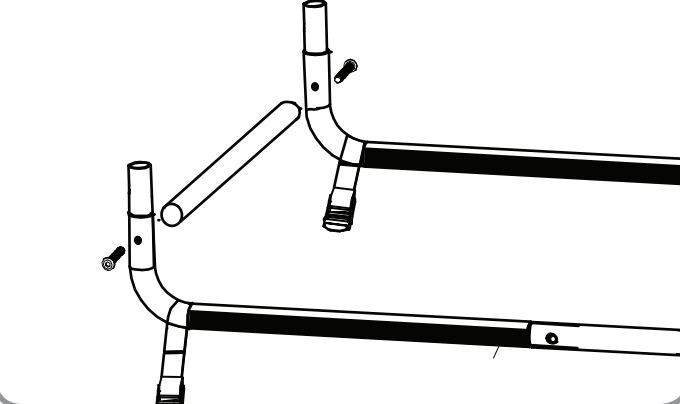

- 3** *Note: Skip this step if using at lower setting.*
Note: Ignorez cette étape si vous n'utilisez que 2 barres transversales.

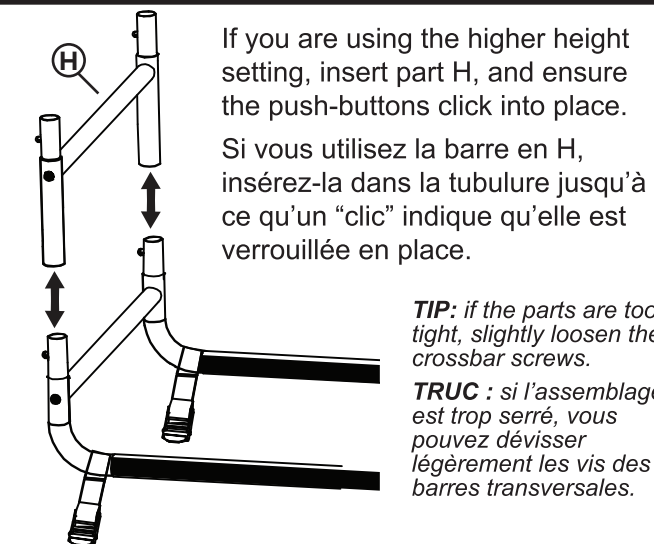


If you are using the higher height setting, insert part H, and ensure the push-buttons click into place.
Si vous utilisez la barre en H, insérez-la dans la tubulure jusqu'à ce qu'un "clic" indique qu'elle est verrouillée en place.

TIP: if the parts are too tight, slightly loosen the crossbar screws.

TRUC : si l'assemblage est trop serré, vous pouvez dévisser légèrement les vis des barres transversales.

- 4** Insert the contoured handle and ensure the push-buttons lock into place. Ensure all crossbar screws are now fully tightened.
Insérez la poignée profilée dans l'assemblage jusqu'à ce qu'un "clic" indique qu'elle est verrouillée en place. Ensuite, assurez-vous que les vis de toutes les barres transversales sont bien serrées.

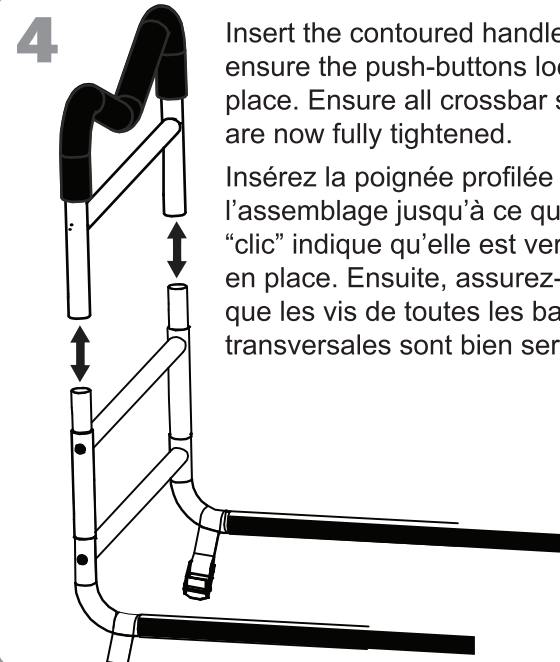


INSTALLING ONTO YOUR BED.

Tip: If possible, remove the mattress to make installation easier.


INSTALLEZ LE PRODUIT SUR VOTRE LIT.

Truc : Si possible, retirez le matelas pour faciliter l'installation.


- 5** Wrap the mattress strap across the bed base and back underneath. Insert the strap through the metal buckle, and tighten partially.
Placez les sangles autour de la base du lit, tel qu'illustré. Insérez ensuite chaque sangle dans la boucle correspondante et serrez partiellement.

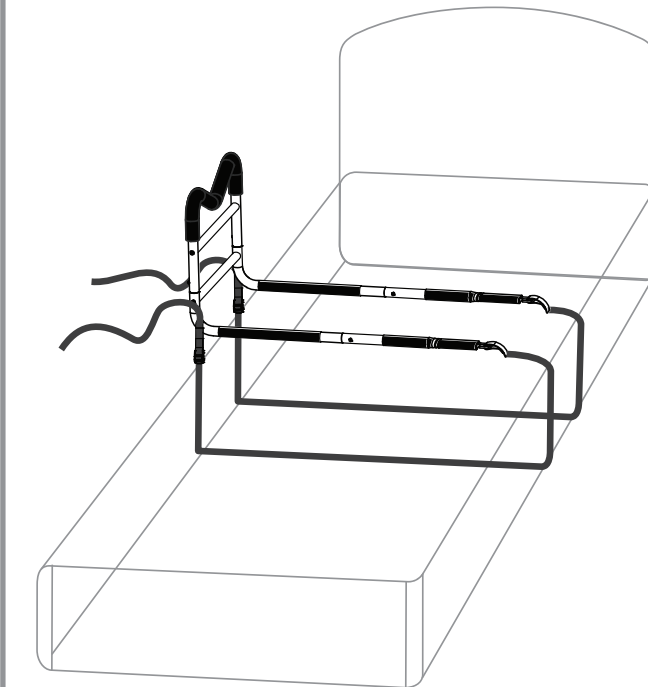

- 6** If it was removed, replace the mattress. Lie on the bed and position the **MGrip** where it is most comfortable for you.
Si vous l'avez retiré, remettez le matelas en place. Étendez-vous sur le lit et ajustez la position du **MGrip** selon vos besoins.

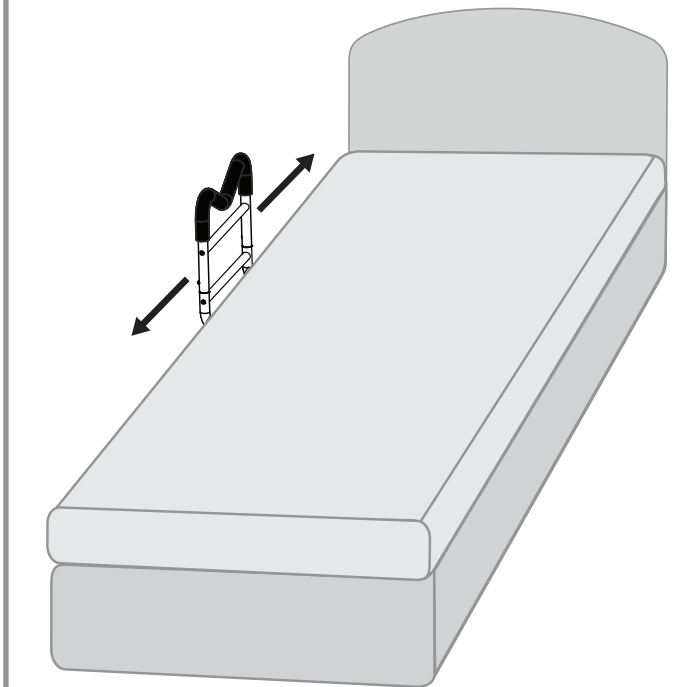

- 7** Tighten the two straps securely through the buckle and against the bed base, ensuring they are straight and parallel.
Tirez sur les sangles en vous assurant qu'elles sont bien parallèles et qu'elles tiennent solidement sur la base du lit.

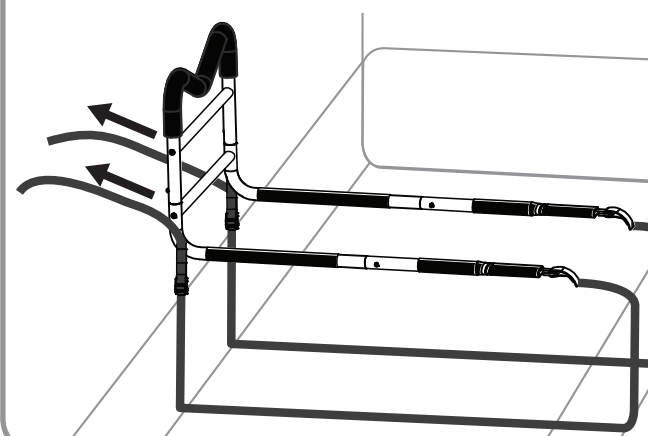

- 8** Double tie the loose ends and/or cut off the excess webbing to prevent tripping hazards.
Nouez la portion excédentaire des sangles ou coupez-les afin de réduire les risques de chute.

